

PASOS PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TROPHY 3D IMAGING

Recomendamos utilizar el buscador Google Chrome




INSTALACIÓN:


1. En la carpeta de instaladores

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ps24JMgf6PMJ734VxK-KkdSkOxLalhJ>


Encontrarás el archivo "TW3DSuite.exe"

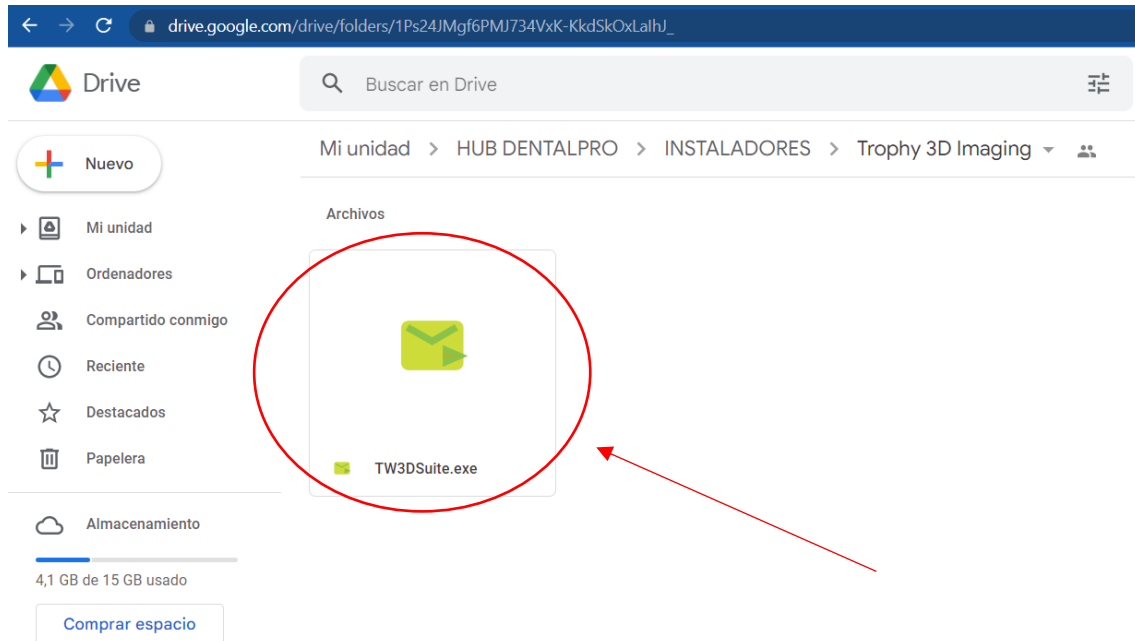


2. Has click en el instalador. Luego en Descargar: (caso te haga una comprobación de virus hacer click en "descargar de todos modos")

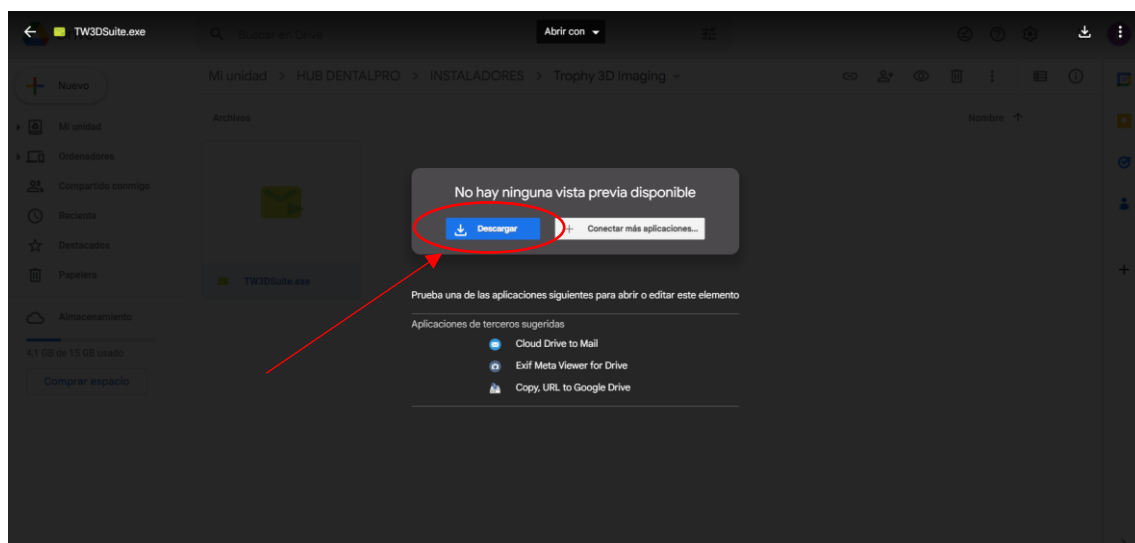


3. El instalador se comenzará a descargar en la parte inferior de tu pantalla. Una vez descargado lo ejecutas:

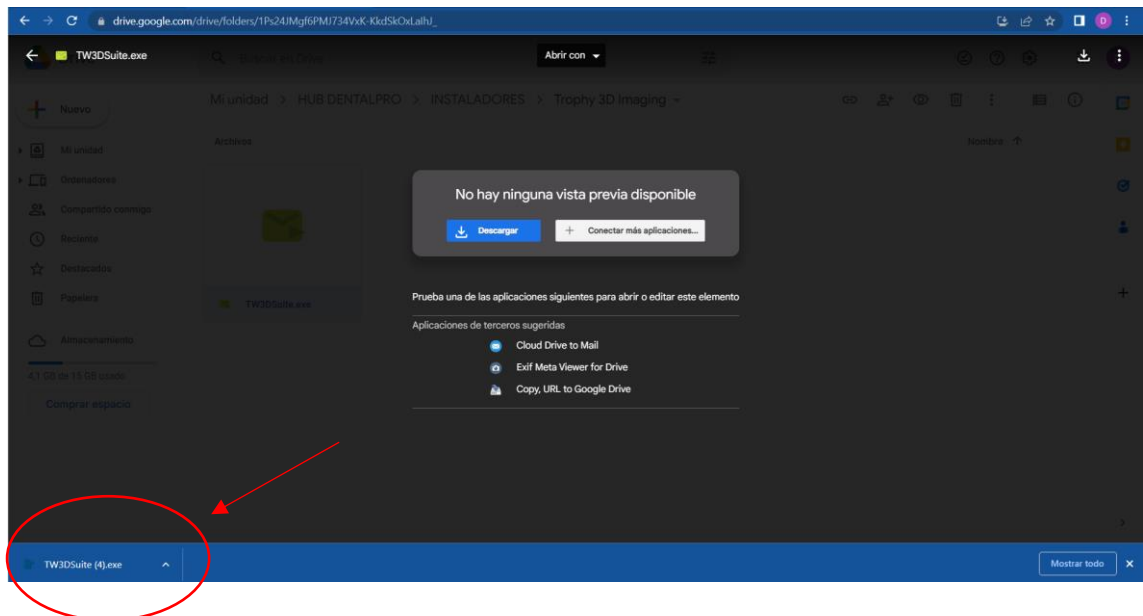


4. Cuando ejecutes, lo aceptas, eliges el idioma español y haces click en “OK”. Luego en “siguiente”:

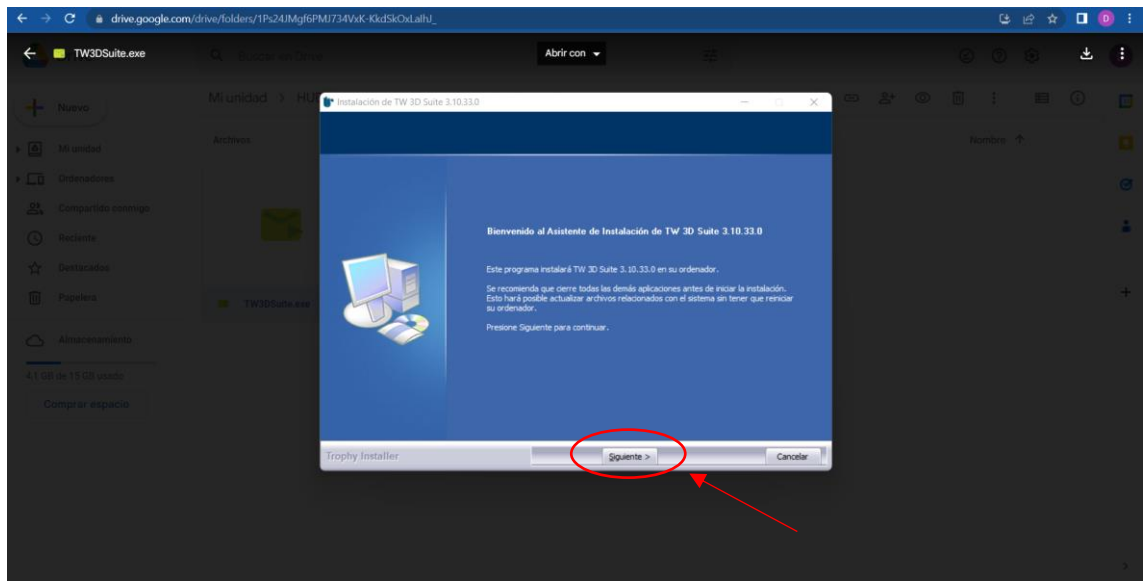


5. Aceptas y luego haces click en “instalar”. Caso te pida una carpeta para almacenar el programa seleccionas “Escritorio” y aceptas:

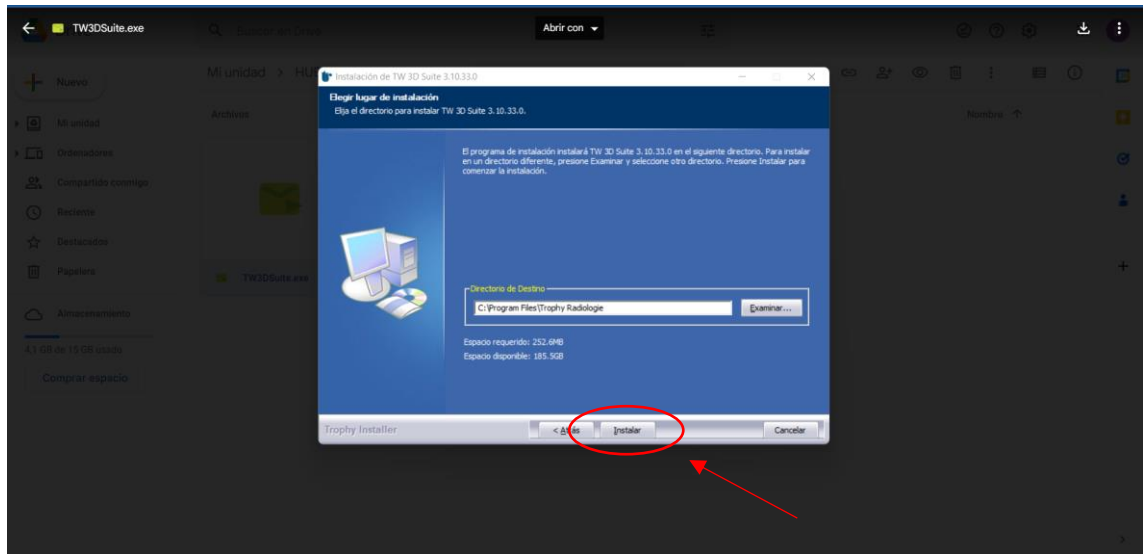

6. Se va a ejecutar la instalación hasta que te presentará 3 opciones de instalación. Tienes que seleccionar “centro radiológico” y “siguiente”:


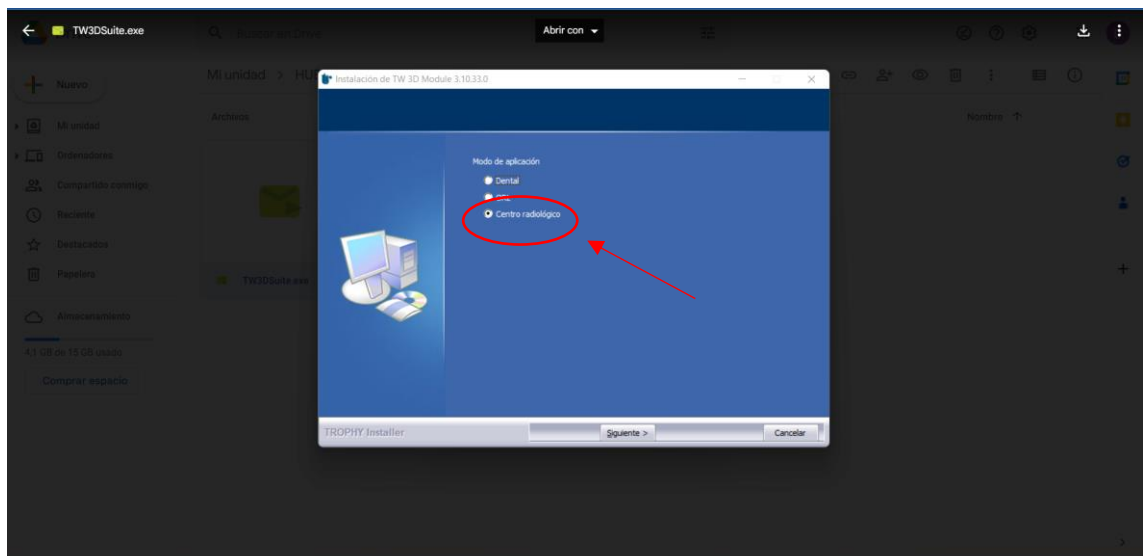


7. Haces click en “terminar”, reinicias la computadora y listo!

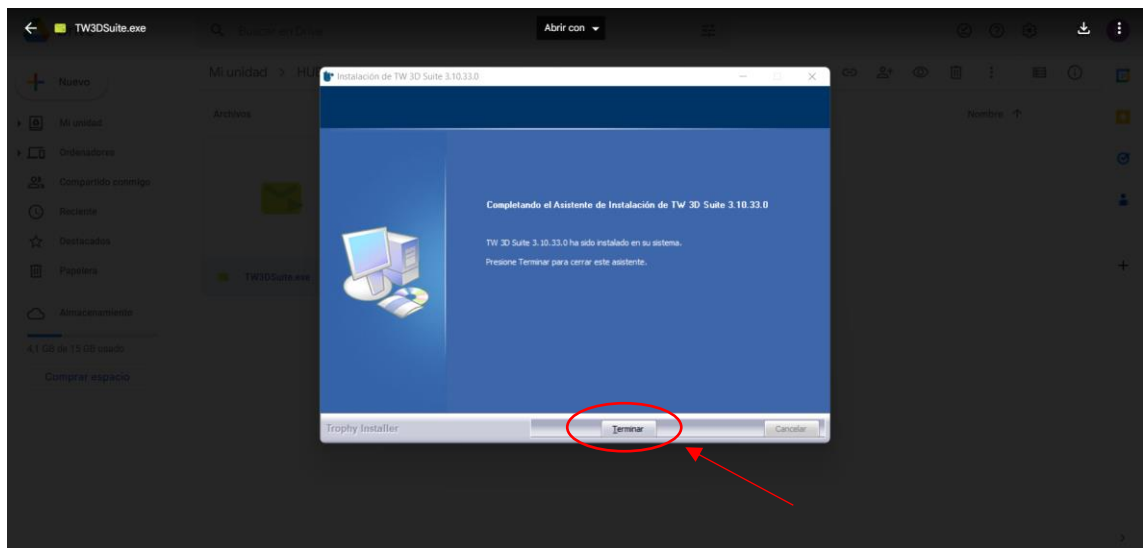


CONFIGURACIÓN COMO PROGRAMA PREDETERMINADO:

1. Haces click en el buscador de Windows (o en el ícono del logo de Windows) y escribes “programas predeterminados” y seleccionas la opción de programas predeterminados:

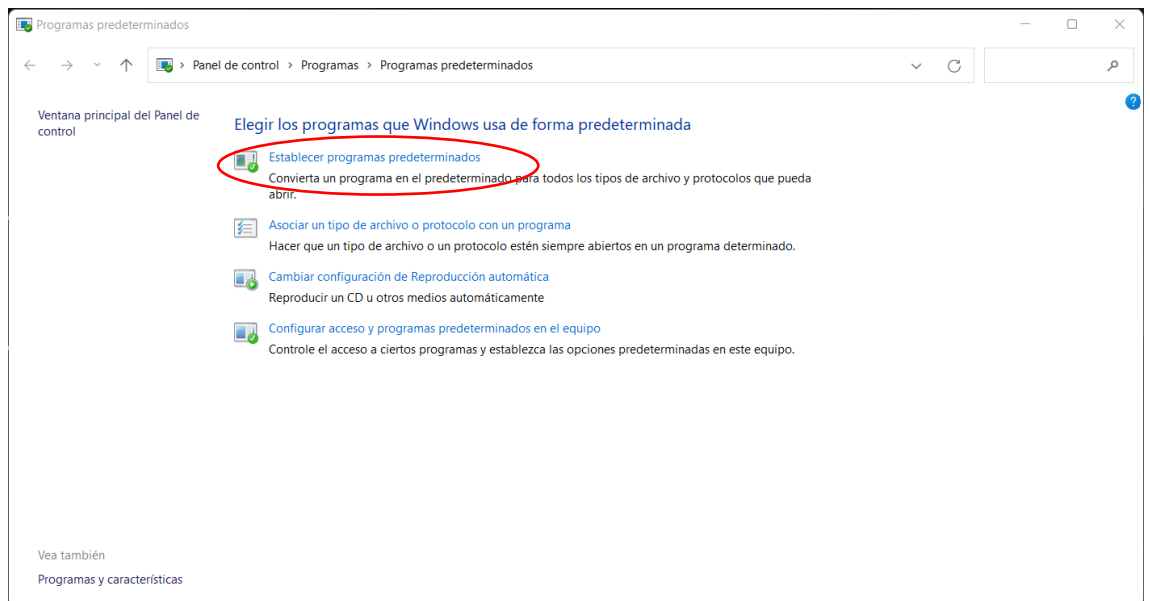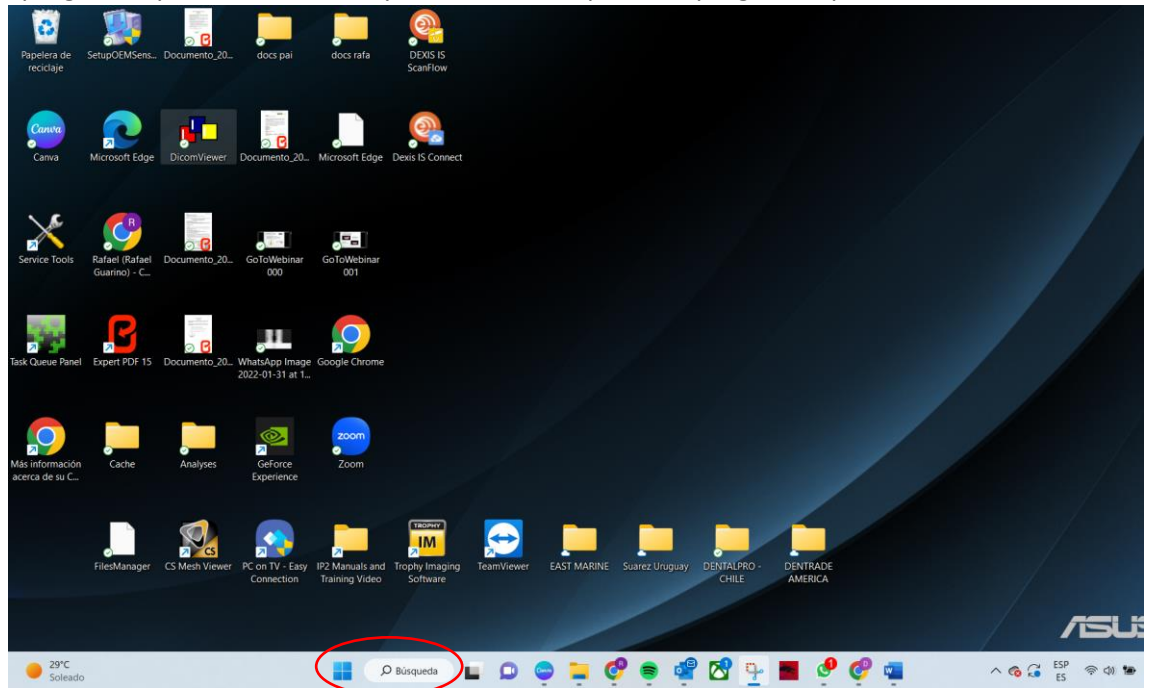


2. Al final de esa página tendrás la opción de “programas predeterminados por tipo de archivo”:

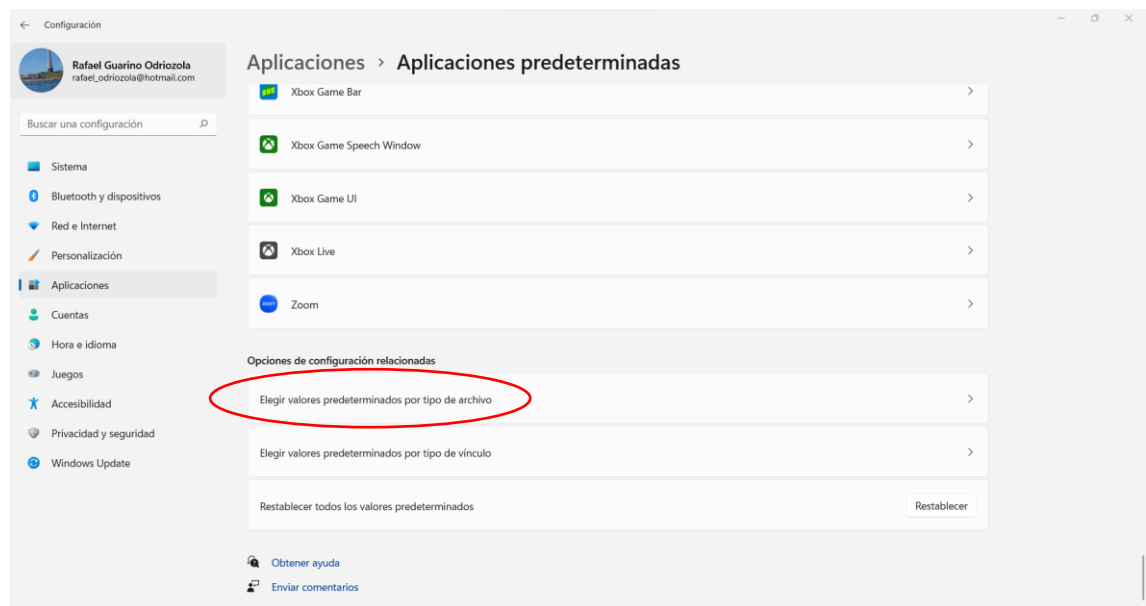

3. Buscar los archivos “dcm”, entras a buscar los programas, copias y pegas esta ruta:

C:\Program Files\Trophy Radiologie\3D Visualization Application


Y seleccionas el programa TW3DModule

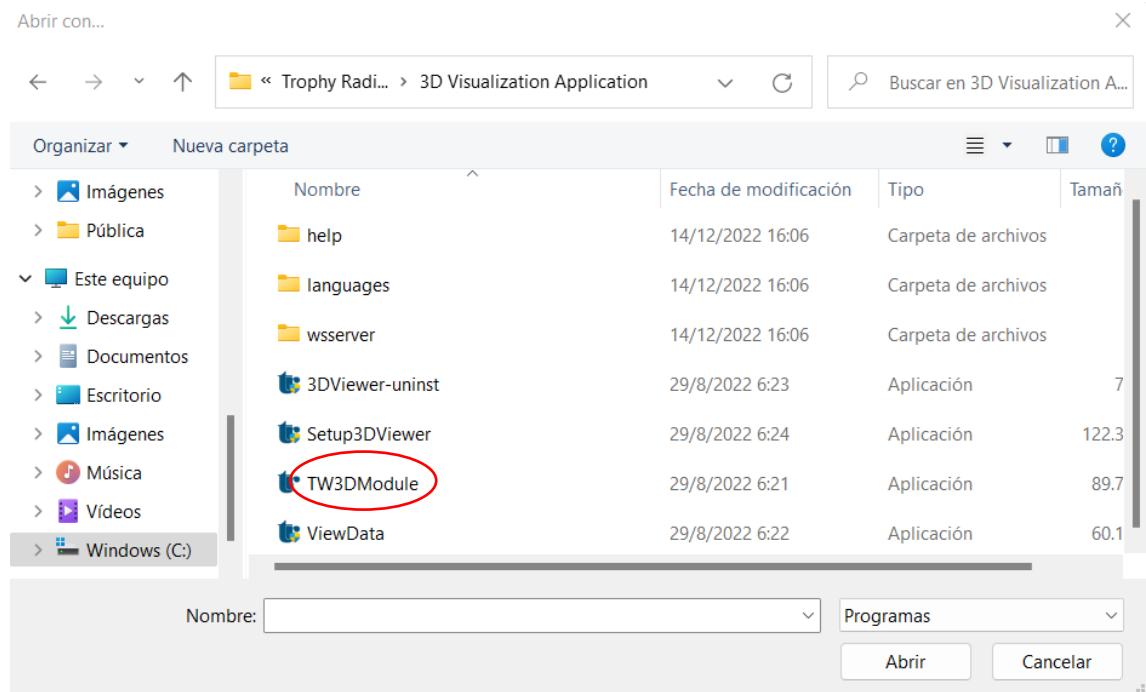

En el caso de que no tuvieras ninguna versión anterior del software Trophy / Carestream Dental instalada y hayas seleccionado tu Escritorio al momento de instalar esta aplicación 3D, tendrás que buscar la carpeta “Trophy Radiologie” en tu Escritorio.

Luego entrar a la carpeta 3D Visualization Application y seleccionar a “TW3DModule” como programa predeterminado para los archivos .dcm

LISTO!

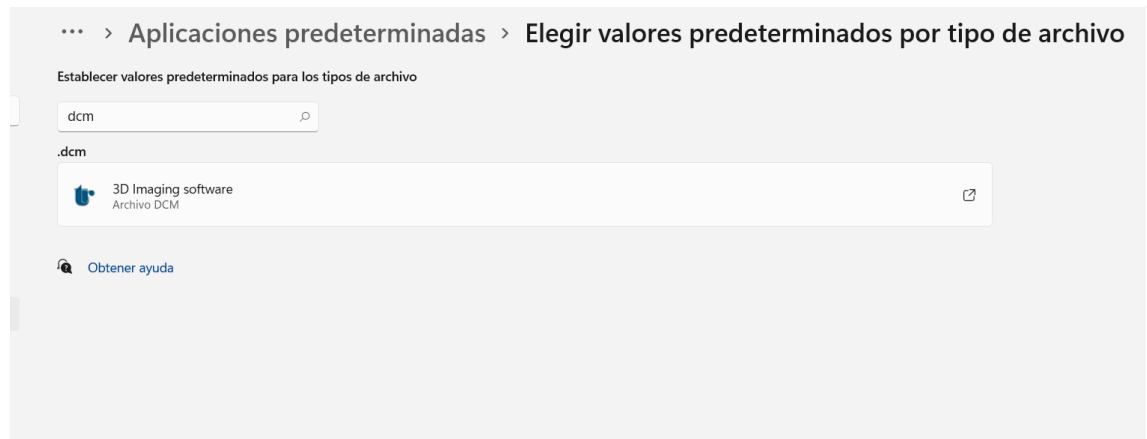

Ahora ya tienes instalado y configurado tu Trophy 3D Imaging para trabajar!